


NTG

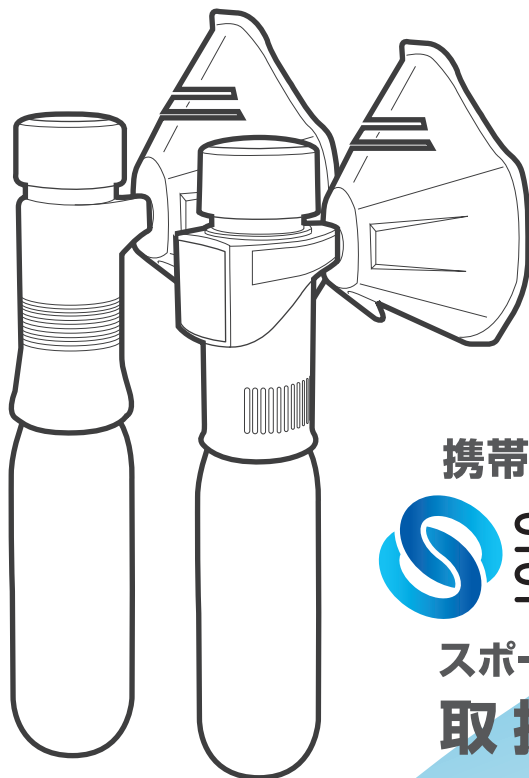

携帯用酸素吸入器



スポーツ酸素D・DX 取扱説明書

■ご使用前に

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本製品は正しい使い方をしないと事故につながる場合がありますので、この取扱説明書を必ずよくお読みください。
- この取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。
- 専用の酸素ガスカートリッジ以外は、絶対に使用しないでください。
- 本製品は医療機器ではありません。医療行為には用いないでください。
また、健康に問題のある方は使用しないでください。
- 本製品は国内専用です。
- 本製品は航空機への持ち込みができません。

標準セット

スポーツ酸素DX

・本体(ゲージ付減圧弁)	: 1台	・スタンド	: 1個
・マスク	: 3個	・取扱説明書	: 1部
・専用酸素ガスカートリッジ	: 2本	・保証書	: 1部

トライアルセット

スポーツ酸素D

・本体(減圧弁)	: 1台
・マスク	: 1個
・専用酸素ガスカートリッジ	: 1本
・取扱説明書	: 1部
・保証書	: 1部

スポーツ酸素DX

・本体(ゲージ付減圧弁)	: 1台
・マスク	: 1個
・専用酸素ガスカートリッジ	: 1本
・取扱説明書	: 1部
・保証書	: 1部

安全上の注意

- 使用の前に、この「安全上の注意」をよく読み、正しくお使いください。
- お読みになった後も、いつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について この取扱説明書には、使用者が製品を安全に使われるために理解しやすいよう
いろいろな絵表示を使用しています。
誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

 **警告：** 取り扱いを誤った場合、人が死亡又は、重症を負う危険が生じることが想定される内容
を示しています。

 **注意：** 取り扱いを誤った場合、人がけがをしたり、物的損傷が発生したる恐れがある内容
を示しています。

絵表示の例   記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
  記号は、使用者の行為を指示強制する内容であることを告げるものです。

警告

 **本製品は医療機器ではありません。医療行為には用いないで
ください。
また、健康に問題のある方は使用しないでください。**

 **本製品は酸素吸入器です。他の目的に使用しないでください。**

 **酸素ガスは支燃性ですので、可燃物や火気に向かったのガスの
放出は絶対にしないでください。**

 **必ず当社製専用酸素ガスカートリッジを使用してください。**

 **ガスカートリッジ及び本体に油脂類は絶対に付けないでください。**

 **使用・保管は火の近くや直射日光を避け、0～40℃の間で行って
ください。**

 **火気の近くでの使用や保管は絶対にしないでください。**

 **分解や改造は絶対にしないでください。**

 **落としたり、ぶつけたりしないでください。**

 **ガスカートリッジを取り付ける時に、ガスが少量漏れてもいっきに
ねじ込んでください。**

 **ガスカートリッジはガスが完全に無くなるまで、本体から絶対
に外さないでください。
本体のダイヤルを全開（反時計回りに停止する位置まで）にし、
ガスが出ないことを確認してから外してください。**


 禁 止	加熱したり、火の中に投じないでください。
	使用済みのガスカートリッジは、封板（蓋）に穴が開いていることを確認してから、各自治体の指示にしたがって処理してください。（材質：スチール）
 禁 止	ガスカートリッジの取り付け、取り外しには工具を用いないでください。
	ガスカートリッジを取り付ける（ねじ込み）時、封板やねじ部にゴミ、油脂類の付着等異常の無いことを確認してください。
 禁 止	清掃時に揮発性溶剤（アルコール、シンナー等）は使用しないでください。水または、水で薄めた中性洗剤で拭いてください。
 禁 止	本体をぬらしたり、水没させないでください。

注意



	ガスカートリッジの取り付け、取り外しの時は必ず本体のダイヤルを「CLOSE□」の位置に戻してください。
	子供の手の届かないところに保管してください。 子供が使用する場合は、必ず保護者の指導のもとで行ってください。
 禁 止	マスク接続口に、口を直接つけて吸入しないでください。

各部名称

スポーツ酸素D

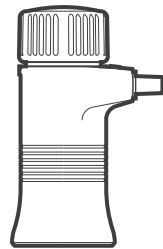

※本書は、本体をスポーツ酸素DXのイラストにて説明していますが、一部を除きスポーツ酸素Dも同様の取り扱いとなります。

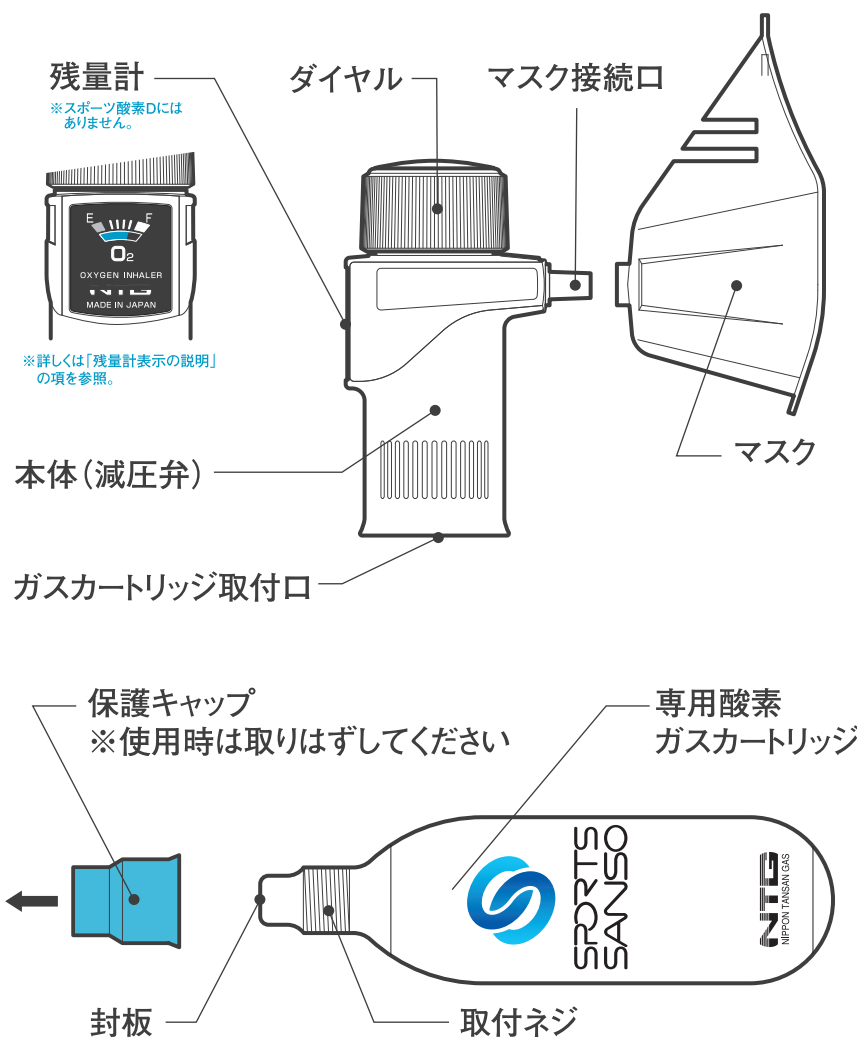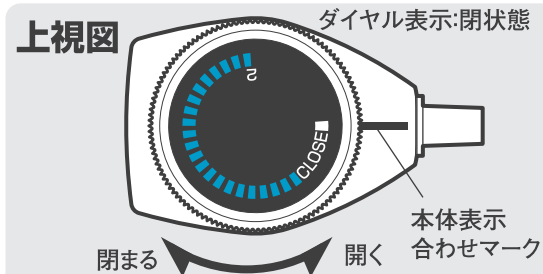

使用方法

ガスカートリッジの取り付け方

警告

- 必ず当社製専用酸素ガスカートリッジを使用してください。
- ガスカートリッジ及び本体に油脂類は絶対に付けないでください。
- ガスカートリッジを取り付ける時に、ガスが少量漏れてもいっきにねじ込んでください。
- ガスカートリッジはガスが完全に無くなるまで、本体から絶対に外さないでください。本体のダイヤルを全開(反時計回りに停止する位置まで)にし、ガスが出ないことを確認してから外してください。
- ガスカートリッジの取り付け、取り外しには工具を用いないでください。
- ガスカートリッジを取り付ける(ねじ込み)時、封板やねじ部にゴミ、油脂類の付着等異常の無いことを確認してください。

- 当社製本体及び専用酸素ガスカートリッジであることを確認します。
- 本体のダイヤルをCLOSEの位置にします。ダイヤル表示の「CLOSE」印を本体表示合せマークの「■」印の位置に合わせます。(時計回り)
- ガスカートリッジのネジに取り付けられている保護キャップを取り外します。
- この状態で、ガスカートリッジを本体のガスカートリッジ取付口に力を入れて回らなくなるまで矢印の方向に回してしっかりねじ込みます。



残量計表示の説明 :スポーツ酸素DX

●残量計はガス使用後のガス残量の目安を表示します。ガスを使用していくと、ゲージの黒ゾーンが増えていきます。

満タンの場合

ゲージ
青く表示される



空の場合

ゲージ
黒く表示される



※環境条件、残量計誤差により多少ずれることがあります。

使用方法

使い方

警告




酸素ガスは可燃性ですので、可燃物や火気に向かったのガスの放出は絶対にしないでください。

注意




子供の手の届かないところに保管してください。
子供が使用する場合は、必ず保護者の指導のもとで行ってください。

- ① ガスカートリッジを取り付けたら、ガスカートリッジ取付口とマスク接続口からガスが漏れていないか確認します。
OXは、残量計でガスがあることを確認してください。
(音がしていないかを確認してください。)

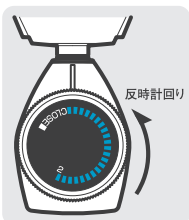

- ② 本体のマスク接続口にマスクを差し込みます。

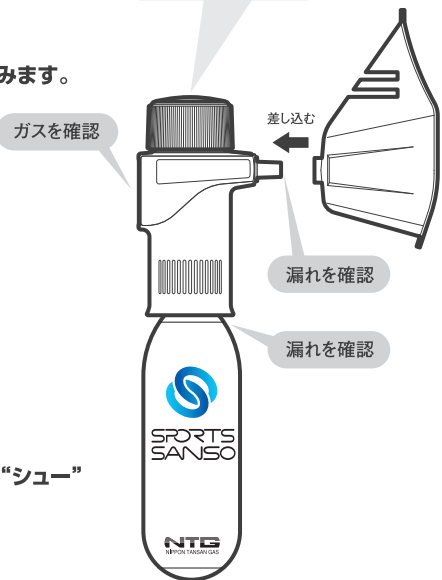

- ③ ダイヤルを回せば(反時計回り)ガスが“シュー”という音と共に出ます。

- ④ 流量(ガスの出かた)はダイヤルで調節できます。
ダイヤルを最大(停止する位置)に回した時(反時計回り)の位置での流量は、毎分約2リットル(2L/min)です。

使用しないときはダイヤルを「CLOSE」の位置に戻してください。

ガスカートリッジの交換の仕方

警告



火気の近くでの使用や保管は絶対にしないでください。




使用済みのガスカートリッジは、封板(蓋)に穴が開いていることを確認してから、各自治体の指示にしたがって処理してください。
(材質: スチール)



ガスカートリッジを取り付ける(ねじ込み)時、封板やねじ部にゴミ、油脂類の付着等異常の無いことを確認してください。

- ① ダイヤルを全開(反時計回りに停止する位置まで)にしてもガスが出ない時は、カートリッジ内のガスがなくなっているので、ダイヤルを「CLOSE」の位置に戻して、ガスカートリッジを矢印の方向にゆっくり回して本体より取り外します。
OXは、残量計でもガスがなくなったことを確認してください。
外し始めに“シュッ”という音がすることがあります。

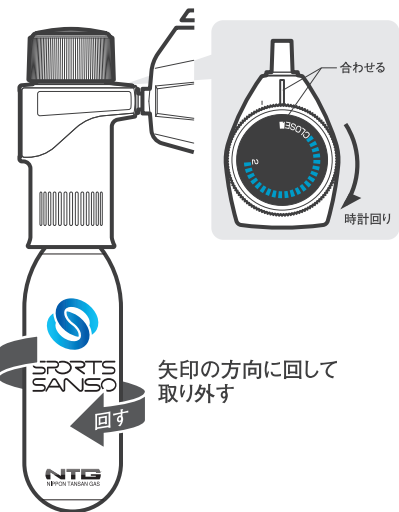

- ② ガスカートリッジの取り付け方は、「ガスカートリッジの取り付け方」をよく読み交換してください。

故障かな?と思ったら

次のような場合は故障ではないことがありますので、修理やアフターサービスをお申し付けになる前にあらかじめお確かめください。

こんなとき	ここをお確かめください	対処方法
ガスがでない	ガスカートリッジがしっかりねじ込まれていますか?	ガスカートリッジを手で強くねじ込む。
	空のガスカートリッジを取り付けていませんか?	ダイヤルを全開(反時計回りに停止する位置まで)にしてガスがないことを確認する。ガスがなければ新しいガスカートリッジと交換する。
	ダイヤルが「CLOSE」の位置になっていませんか?	ダイヤルを反時計回りに回す。
ガスが漏れる	ガスカートリッジが完全にねじ込まれていますか?	手で力を入れてしっかりとねじ込む。それでも漏れていたら、ガスが完全になくなってからガスカートリッジを取り外し、取付部にゴミがあれば除去する。
	ネジ部に異物・ゴミ等が付着していませんか?	

アフターサービスについて

修理を依頼されるには、お買い上げの販売店又は弊社に、故障状況を詳しくご連絡の上お申し付けください。

製品の保証について

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
詳しくは、保証書をご覧ください。

仕様

本体(減圧弁)	スポーツ酸素D	スポーツ酸素DX
構造	ガスカートリッジ取付部形状：5/8-18UNF(専用酸素ガスカートリッジに対応) 出口接続部形状：付属マスクに対応	
流量	0～約2L/min	
圧力	0～約0.3MPa	
安全装置	一次側:可溶栓型安全弁 二次側:復帰型安全弁 0.9MPa迄に作動	
使用温度範囲	0～40℃	
残量計	——	F(満)～E(空)
専用酸素ガスカートリッジ 高圧ガス保安協会認定品		
充填圧力	19.2MPa	
内容積	98mL	
ガス量	22.5g(約17L ※20℃時)	
ガス純度	99%以上	
安全装置	安全封板(低流量放出型破裂板)	
外形寸法	使用状態：φ40×100D×230H	
質量	約430g	約450g

●スポーツ酸素ホームページ

<http://www.keitaisanso-ntg.com/sports-sanso/>

※交換用の専用酸素ガスカートリッジは、お買い上げの店舗でご購入ください。

改良のため仕様を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

お買い上げ店

製造者

NTG
日本炭酸瓦斯株式会社

〒120-0012 東京都足立区青井3-12-15

問合せ先 TEL.03-3849-1573(国内営業部)

<http://www.ntg.co.jp/>

20-I